

STOCKAGE

Les ancres ARTHROVIMS ANCHOR PEEK doivent être stockées dans leur emballage d'origine intact, dans un environnement propre et sec, à température ambiante.

PRODUITS & INSTRUMENTATION

Les ancres ARTHROVIMS ANCHOR PEEK sont conditionnées sous double sachet, et stérilisées à l'oxyde d'éthylène. L'instrumentation pour la chirurgie sous arthroscopie est disponible. Les ancres ARTHROVIMS ANCHOR PEEK doivent être utilisées avec les instruments correspondants fournis par VIMS.

Usage unique. Ne pas restériliser.

Pour toute information complémentaire, merci de lire la notice d'utilisation.

ANCRES	TAILLE	REF	INSTRUMENTATION
COIFFE DES ROTATEURS			
VIM-FIX PK (2 sutures)	4,5	BAS-9141.45F	BAS-9103 Pointeau-taraud
VIM-FIX PK (3 sutures)	4,5	BAS-9145.45F	
VIM-FIX PK (2 sutures)	5,5	BAS-9090.55F	
VIMS-FIX PK (3 sutures)	5,5	BAS-9091.55F	
VIM-FIX PK (2 sutures)	6,5	BAS-9144.65F	
VIM-FIX PK (3 sutures)	6,5	?	
VIMS-FIX LR	5,5	BAS-9092-55F	BAS-9112 Pointeau
VIMS-FIX LR	4,75	BAS-9142.475	
VIMS-FIX LRT (metallic 8p)	5,5	BAS-9136.55F	
VIMS-FIX LRT (metallic 8p)	4,75	BAS-9143.475F	
SLAP, BANKART, INSTABILITE			
Mini-Vim PK (1 suture aiguillée)	1,8	BAS-9139.18F	BAS -9012 Guide embout pointu pour BAS-9086.28F
Mini-Vim PK (1 suture aiguillée)	2	BAS-9140.20F	BAS -9109 Guide embout mousse pour BAS-9086.28F BAS-9013 Trocart pour BAS-9012 et BAS-9109
Mini-Vim PK (1 suture)	2,8	BAS-9086.28F	BAS-9100 Foret diam. 2,4 mm pour BAS-9086.28F
Mini-Vim PK (2 sutures)	3	BAS-9088.30F	BAS-9110 Guide embout pointu pour BAS-9088.30F et BAS-9089-35F
Mini-Vim PK (2 sutures)	3,5	BAS-9089.35F	BAS-9097 Guide embout mousse pour BAS-9088.30F et BAS-9089-35F BAS-9098 Trocart pour BAS-9110 et BAS-9097
Mini-Vim PK Knotless	2,8	BAS-9087.28F	BAS-9101 Foret diam. 2,6 mm pour BAS-9088.30F BAS-9102 Foret diam. 3,0 mm pour BAS-9089.35F BAS -9127 Guide poignée pour BAS-9087.28F BAS-9111 Foret diam. 2,5 mm pour BAS-9087.28F
TENODESE DU BICEPS			
Vim-Fix BT	5	BAS-9093.50F	BAS-9104 Foret diam. 5mm
Vim-Fix BT	6	BAS-9094.60F	BAS-9105 Foret diam. 6mm
Vim-Fix BT	7	BAS-9095.70F	BAS-9106 Foret diam. 7mm
Vim-Fix BT	8	BAS-9096.80F	BAS-9104 Foret diam. 8mm BAS-9113 Plaque de calibrage



CLASSE IIB / ANCRE
CLASSE I NON STÉRILE / INSTRUMENTATION



VIMS SA
10 AVENUE DE FONTRÉAL - EUROCENTRE
31620 VILLENEUVE LES BOULOC - FRANCE
TÉL. +33 5 34 45 09 09 - FAX. +33 5 61 22 85 84

VIMS-SYSTEM.COM



ANCRE DE SUTURE EN PEEK

ANCRE PEEK

PK

ARTHRO VIMS®

ANCHOR



 **SPORT
MEDICINE**
ADVANCED TECHNOLOGY

ANCRES DE SUTURE EN PEEK

Indiquées pour la fixation des tissus mous ou prothétiques à l'os.

Les ancrs de suture **ARTHROVIMS ANCHOR PEEK** sont des ancrs vissés ou impactés associés à deux ou trois fils de suture UHMWPE (USP2) et montés sur un tournevis à usage unique permettant l'insertion et le verrouillage dans l'os. Elles sont composées d'un polymère thermoplastique le **PEEK** (Polyetheretherketone) VESTAKEEP considéré comme l'un des plus performant dans le monde avec plus de 15 ans de recul clinique en orthopédie.

AVANTAGE DU PEEK

- Propriétés mécaniques élevées
- Excellente biocompatibilité
- Chimiquement inerte
- Radio transparent
- Module d'élasticité proche de celui du tissu osseux : transfert des contraintes plus homogène, réduction des zones de stress.



ÉPAULE
COIFFE DES ROTATEURS,
TÉNOÏDÉSE ET RÉINSERTION
DU BICEPS

DIAMÈTRE
(mm)

4,5

5,5

6,5



VIM-FIX PK ANCRE VISSÉE À BLOPAGE CORTICAL

L'ancr **VIM-FIX PK** est une ancre de suture entièrement filetée présentant un double filet pour augmenter la fixation corticale et spongieuse, dont l'extrémité est arrondie pour protéger les sutures et faciliter l'insertion.

Particulièrement adaptée pour la **réparation de la coiffe des rotateurs** et les pathologies associées, cette ancre est disponible avec 2 ou 3 fils de suture.

Double filet Spongieux et cortical


- Maximise la force de fixation en augmentant l'interaction entre l'os cortical et spongieux
- Couple de torsion plus important lors de son insertion
- Résistance maximale à la traction donc à l'arrachement

Empreinte interne du tournevis optimale

- Surface de contact entre l'ancr et le tournevis plus importante pour un meilleur couple de torsion et une insertion guidée

4,5 - 5,5 - 6,5 mm 2 ou 3 fils de suture

- Versatilité et adaptation à de multiples techniques chirurgicales

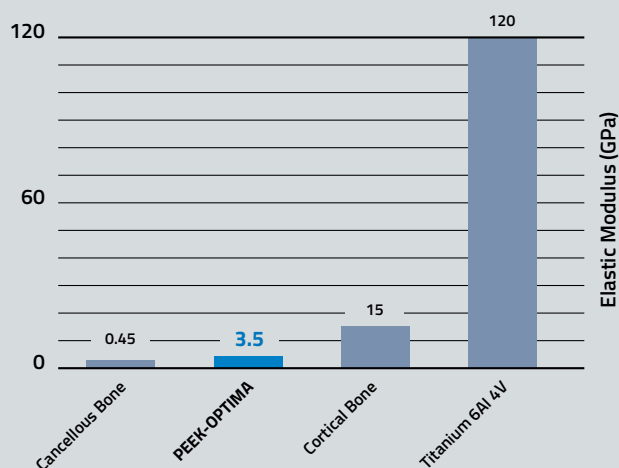

VIM-FIX LR

ANCRE IMPACTÉE
SANS NŒUDS

VIM-FIX LR et **LRT** sont des ancres totalement filetéées, sans nœuds, conçues pour être utilisées en association avec des fils de suture ou bandelettes lors de la réparation de la coiffe de rotateurs mettant en œuvre les techniques dites de « **bridge** ».

La technique « **knotless** » consiste à passer la suture ou la bandelette à travers la coiffe puis la charger à travers l'œillet de l'ancre qui est alors insérée dans la cavité osseuse. La tension est visualisée, adaptée puis bloquée par le corps de l'ancre vissée. Cette technique élimine les éventuelles complications causées par les nœuds par rapport aux autres ancrages conventionnels.



ÉPAULE

COIFFE DES ROTATEURS

DIAMÈTRE
(mm)

4,75

5,5



MINI VIM PK

ANCRE IMPACTÉE

Les ancrs de suture **MINI-VIM PK** sont disponibles dans de nombreuses configurations : plusieurs tailles, avec une ou deux sutures, avec ou sans aiguille ou knotless. Elle présente un œillet qui fournit une résistance d'abrasion supérieure en raison du bas coefficient de friction du PEEK.

L'utilisation de l'ancre **MINI-VIM PK** met en œuvre une technique simple et reproductible utilisant un guide pour le forage et pour l'impaction de l'ancre.

Ailettes

- Impaction sûre et efficace
- Résistance maximale à la traction

Impaction

- Simplicité d'utilisation



ÉPAULE

BANKART, SLAP,
INSTABILITÉ

DIAMÈTRE
(mm)

1,8

2,0

2,8

3,0

3,5



VIM-FIX BT

ANCRE VISSÉE
SANS NŒUDS

L'ancre **VIMFIX-BT** est conçue pour la ténodèse du biceps proximal sous arthroscopie.

Ce système permet de réduire le temps opératoire de par sa simplicité et son efficacité.

L'implant est caractérisé par un œillet en PEEK qui permet de diriger le tendon de biceps au fond de la cavité osseuse.

Il n'y a aucun besoin de prédéterminer la longueur de tendon, car le positionnement et la tension sont facilement visualisés avant l'insertion finale de l'ancre.

La fixation est simplement obtenue en vissant l'ancre **VIM-FIX BT** pré-chargée.

Les forets ainsi qu'une plaque de calibrage du greffon sont disponibles.



ÉPAULE

TÉNOÏDÈSE DU BICEPS

DIAMÈTRE
(mm)

5,0

6,0

7,0

8,0



AVANTAGES DES SUTURES

Les ancrs ARTHROVIMS ANCHOR PEEK sont associées à 2 fils de suture USP2 (en polyéthylène de très haut poids moléculaire (UHMWPE)).

HAUTE RÉSISTANCE À LA TRACTION
RÉALISATION AISÉE DE NŒUDS
SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ DES SUTURES

