




CAPELLA
SOFT

LINEA CAPELLA
LINEA CAPELLA
LINEA CAPELLA



Distribuido por:

PROMED
Latam

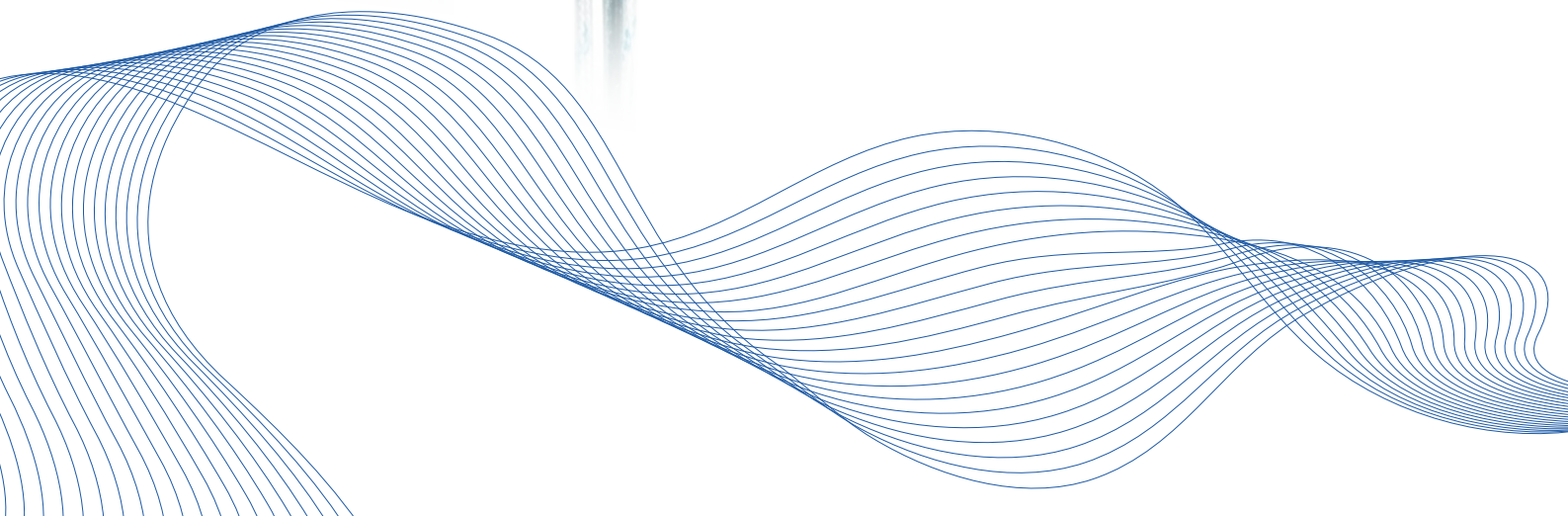


ANCLAJE DE SOLO SUTURA


Especialmente diseñado para la fijación de tejidos blandos al hueso

CAPELLA SOFT son anclajes impactados de pequeño diámetro compuestos exclusivamente por fibras textiles.


El cuerpo de poliéster del anclaje está asociado con una o dos roscas de sutura UHMWPE que se montan en un mango descartable que permite la inserción en el hueso. La tracción en los hilos de sutura permite modificar la forma del cuerpo del anclaje que se bloquea así detrás del hueso cortical y asegura un anclaje efectivo.

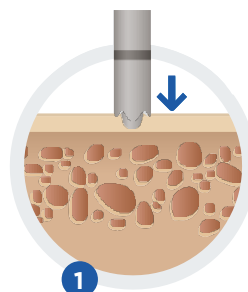


1
Inserción de la guía y el obturador hasta el contacto con el hueso

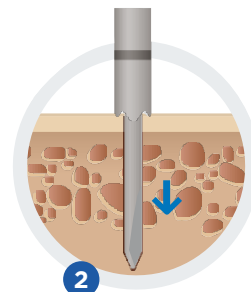


2
Creación de túneles con el pin hasta la marca láser

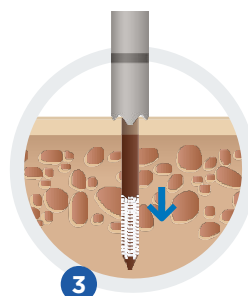

3
Inserción del anclaje en la guía hasta el marcado láser

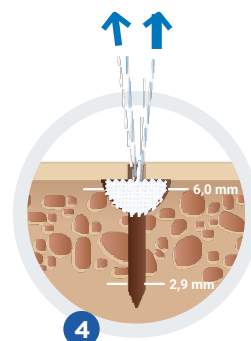

4
Tracción de las suturas y expansión radial del anclaje

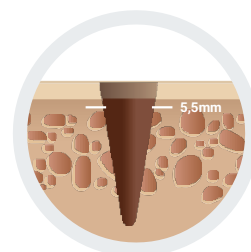

Stock óseo en comparación con un anclaje convencional

VENTAJAS DEL CAPELLA SOFT

- Economía ósea
- Fácil de usar
- No hay material rígido en caso de revisión o desgarro
- Se puede usar bajo artroscopia o mini abierto
- Biocompatible
- Alta resistencia a la extracción
- No absorbible



Ø 2,9
mm

Ø 1,8
mm



TOBILLO

VENTAJAS DE LAS SUTURA

CAPELLA SOFT están asociados con 2 suturas USP2
(hechas de polietileno UHMWPE de muy alto peso molecular).



ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN FÁCIL
REALIZACIÓN DE NUDOS RESISTENCIA Y
SEGURIDAD DE LAS SUTURAS

CAPELLA SOFT

ALMACENAMIENTO

CAPELLA SOFT debe almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura.

PRODUCTOS E INSTRUMENTACIÓN

CAPELLA SOFT se envasa en una bolsa doble y se esteriliza con óxido de etileno. Instrumentación para procedimientos artroscópicos está disponible. De un solo uso. No vuelva a esterilizar. **CAPELLA SOFT** debe utilizarse con la instrumentación correspondiente.

Para obtener más información, consulte la IFU.

IMPLANTES	TAMAÑO	REFERENCIAS
CAPELLA SOFT	2,9	43-1112-312935
CAPELLA SOFT	1,8	43-1112-311820