

# CAPELLA SOFT



Distribuido por:

**PROMED**   
*Latam*

# ANCLAJE DE SOLO SUTURA

Está especialmente diseñado para la fijación de tejidos blandos al hueso


CAPELLA SOFT son anclajes impactados de pequeño diámetro compuestos exclusivamente por fibras textiles.

El cuerpo de poliéster del anclaje está asociado con dos hilos de sutura (UHMWPE) que se montan en un mango descartable y que permite la inserción en el hueso.

La tracción en los hilos de sutura permite modificar la forma del cuerpo del anclaje que se bloquea así detrás del hueso cortical y asegura un anclaje efectivo.




INESTABILIDAD DE HOMBRO  
SLAP / BANKART

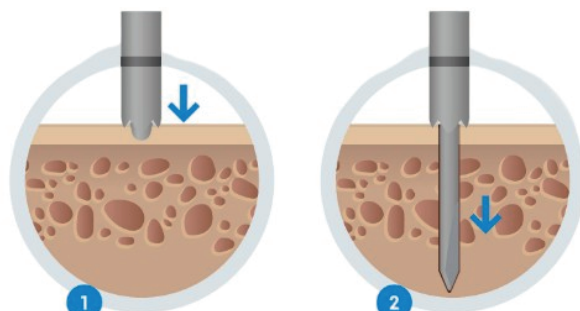


1 Inserción de la guía y el obturador hasta el contacto con el hueso.

2 Creación de túneles con el pin hasta la marca láser.

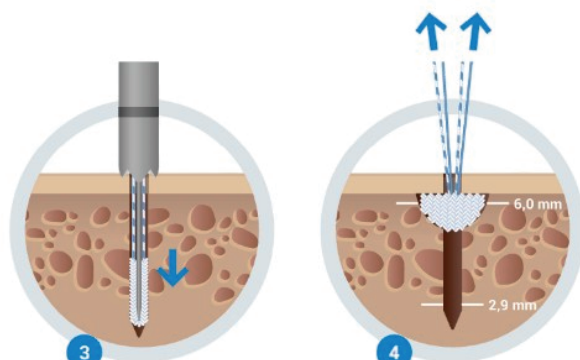

3 Inserción del anclaje en la guía hasta el marcado láser.

4 Tracción de las suturas y expansión radial del anclaje.

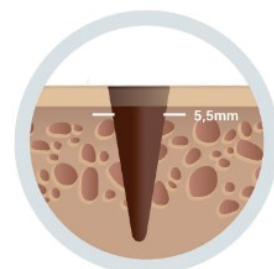

Stock óseo en comparación con un anclaje convencional.


## VENTAJAS DEL CAPELLA SOFT

- Economía ósea
- Fácil de usar
- No hay material rígido en caso de revisión o desgarro
- Se puede usar bajo artroscopia o mini abierto
- Biocompatible
- Alta resistencia a la extracción
- No absorbible

**Punta biselada**  
para mejor impactación en el tejido óseo

**Marcado láser**  
para visualización de inserción



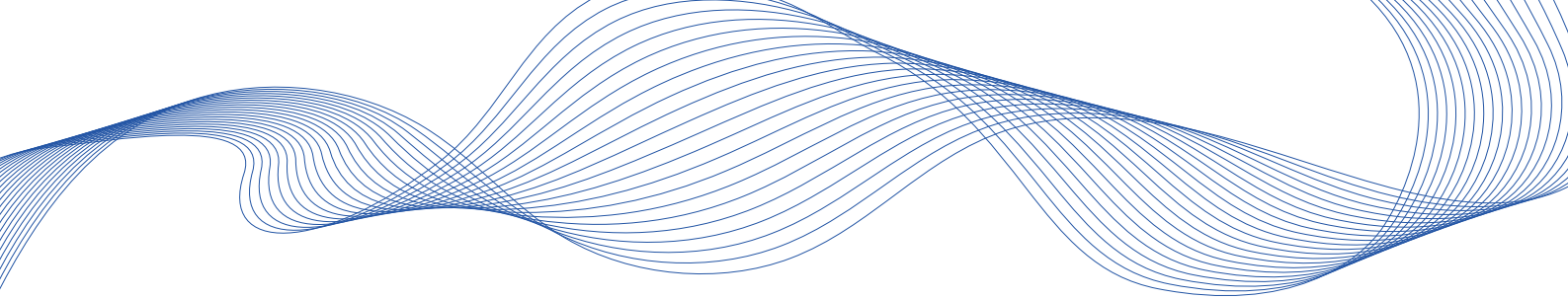

DIÁMETRO  
(mm)

Ø 2.9  
mm

Ø 1.8  
mm



INESTABILIDAD DE HOMBRO  
SLAP / BANKART



## VENTAJAS DE LAS SUTURA

CAPELLA SOFT está precargado con 2 suturas USP2  
hechas de polietileno (UHMWPE).

ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN FÁCIL

REALIZACIÓN DE NUDOS RESISTENCIA Y  
SEGURIDAD DE LAS SUTURAS

# CAPELLA SOFT

## ALMACENAMIENTO

CAPELLA SOFT debe almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

## PRODUCTO

CAPELLA SOFT se envasa en una bolsa doble y se esteriliza con óxido de etileno.

De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU.

IMPLANTE	TAMAÑO	REFERENCIA
ANCLAJE INESTABILIDAD CAPELLA SOFT	Ø 2.9 mm	43-1112-312935
ANCLAJE INESTABILIDAD CAPELLA SOFT	Ø 1.8 mm	43-1112-311820