




**MIRACH**  
SOFT



Distribuido por:

**PROMED**  
*Latam*

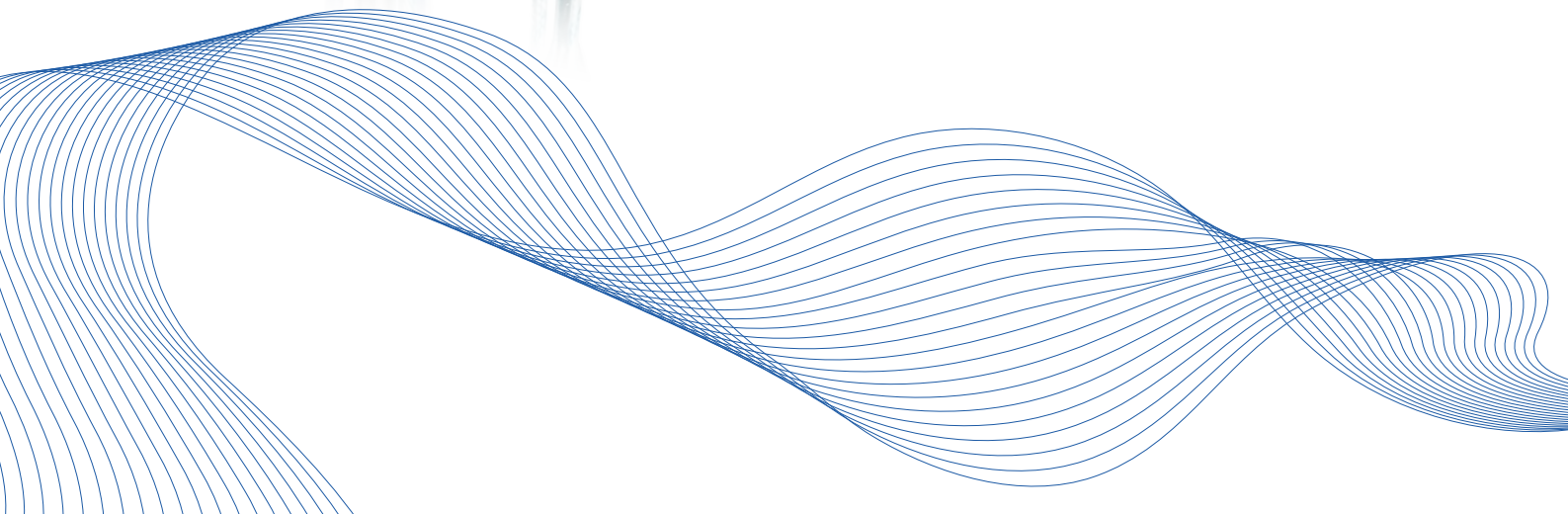


# ANCLAJE DE SOLO SUTURA


Está especialmente diseñado para la fijación de tejidos blandos al hueso

**MIRACH SOFT** son anclajes impactados de pequeño diámetro compuestos exclusivamente por fibras textiles.


El cuerpo de poliéster del anclaje está asociado con una rosca de sutura UHMWPE que se montan en un mango descartable que permite la inserción en el hueso. La tracción en los hilos de sutura permite modificar la forma del cuerpo del anclaje que se bloquea así detrás del hueso cortical y asegura un anclaje efectivo.

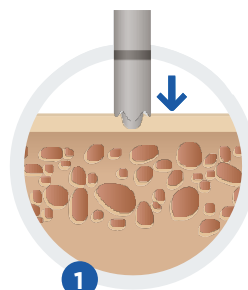


1  
Inserción de la guía y el obturador hasta el contacto con el hueso

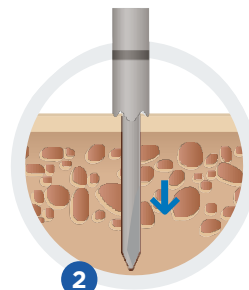


2  
Creación de túneles con el pin hasta la marca láser

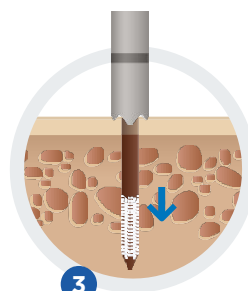

3  
Inserción del anclaje en la guía hasta el marcado láser

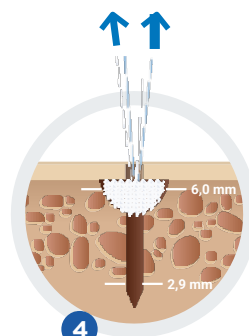

4  
Tracción de las suturas y expansión radial del anclaje

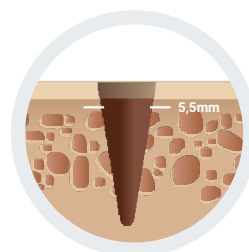

Stock óseo en comparación con un anclaje convencional

## VENTAJAS DEL MIRACH SOFT

- Economía ósea
- Fácil de usar
- No hay material rígido en caso de revisión o desgarro
- Se puede usar bajo artroscopia o mini abierto
- Biocompatible
- Alta resistencia a la extracción
- No absorbible



**MANO**  
**REINSERCIÓN DE**  
**TENDONES Y**  
**LIGAMENTOS**

Ø 1,5  
mm

Ø 1,2  
mm



## VENTAJAS DE LAS SUTURA

**MIRACH SOFT** están asociados con 1 sutura USP2  
(hechas de polietileno UHMWPE de muy alto peso molecular).



ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN FÁCIL  
REALIZACIÓN DE NUDOS RESISTENCIA Y  
SEGURIDAD DE LAS SUTURAS

# MIRACH SOFT

## ALMACENAMIENTO

**MIRACH SOFT** debe almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura.

## PRODUCTOS E INSTRUMENTACIÓN

**MIRACH SOFT** se envasa en una bolsa doble y se esteriliza con óxido de etileno. Instrumentación para procedimientos artroscópicos está disponible. De un solo uso. No vuelva a esterilizar. **MIRACH SOFT** debe utilizarse con la instrumentación correspondiente.

Para obtener más información, consulte la IFU.

IMPLANTES	TAMAÑO	REFERENCIAS
MIRACH SOFT	Ø1,5mm	43-0712-691523
MIRACH SOFT	Ø1,2mm	43-0712-691221