




RENOVA SPINE

KIT DE CIFOPLASTIA
TAMAÑO DISPONIBLE 11G

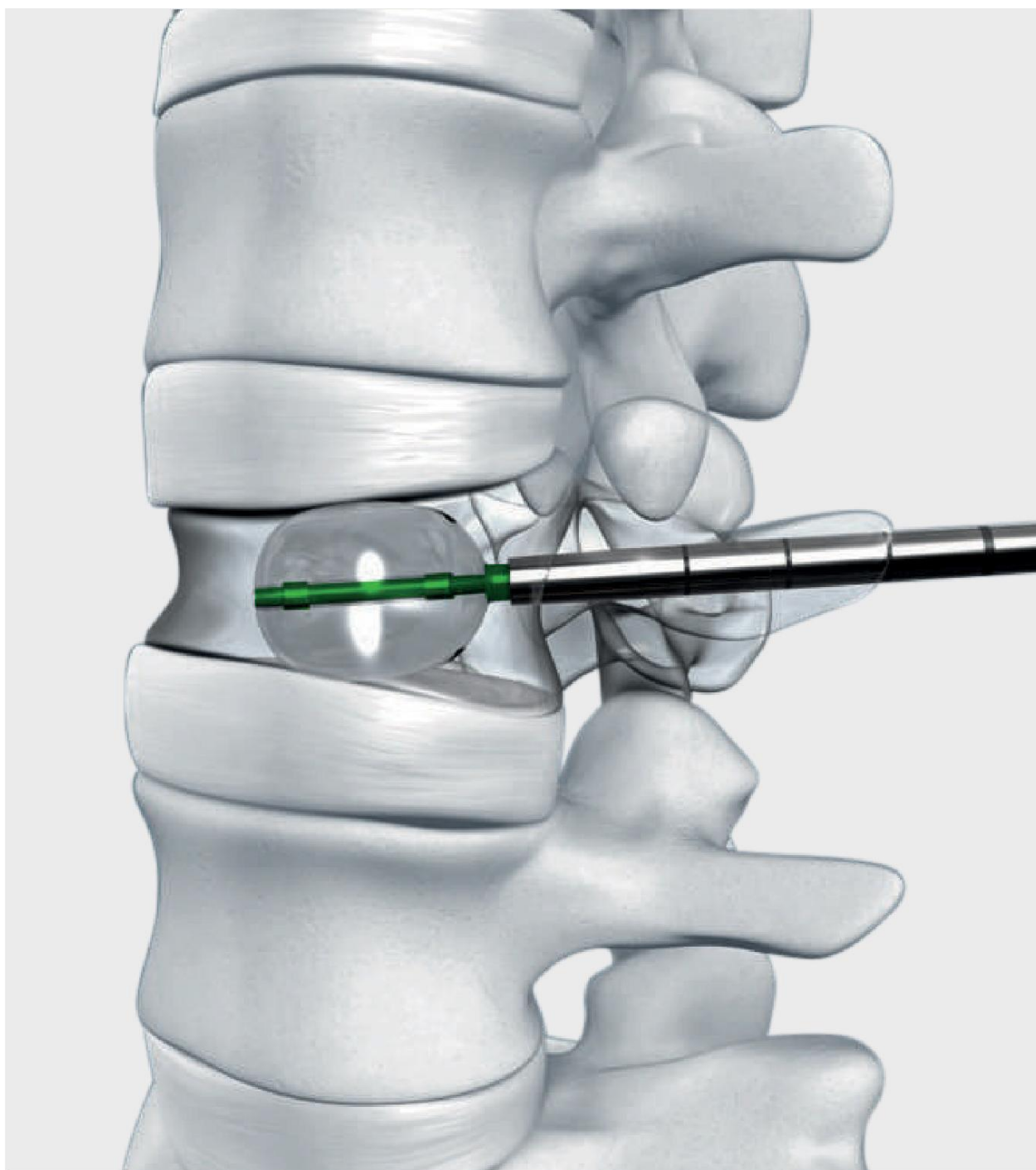

CIFOPLASTIA 11G

TÉCNICA QUIRÚRGICA



CREACIÓN DE ACCESO

Bajo fluoroscopia, inserte la cánula de acción rápida en el cuerpo vertebral hasta que esté firmemente colocada (aproximadamente 3 mm de profundidad). Mantenga la cánula en su lugar, retire el estilete y deje la cánula de acción en su posición.



PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD

Inserte la broca a través de la cánula de trabajo hasta el cuerpo vertebral. Gire 180° en sentido horario y antihorario para crear una vía para el balón y luego retire la broca. En su lugar, retire el estilete y deje la cánula de acción en su posición.



CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DE INFLADO

Conecte el catéter con balón a un sistema de inflado precargado (relación medio de contraste/solución salina: 1:2).



POSICIONAMIENTO DEL GLOBO

Bajo guía fluoroscópica, inserte el catéter con balón a través de la cánula de trabajo y colóquelo correctamente (vista AP y lateral).



INFLADO DE GLOBOS

Infle el balón hasta el volumen deseado o la presión máxima medible y, a continuación, desinfe completamente desenroscando el mango del inflador. Retire el catéter del balón desinflado.



INYECCION DE CEMENTO

Cargue las jeringas Luer-lock con cemento óseo y transfíralo a un relleno óseo. Inyecte el cemento a través de la cánula de trabajo, utilizando el émbolo para una administración controlada. Una vez colocado el cemento, retire el relleno óseo, vuelva a insertar el estilete y extraiga con cuidado la cánula de trabajo.





Cra 67 # 43 - 17
Br. Salitre Greco

Tel : (+57) (1) 2214599
E-mail : info@promed.com.co



Rev. 02 del 25-10-18