



TECRES
ADVANCING HIGH TECHNOLOGY

Cemento de Aumentación MENDEC® SPINE

Mendec® Spine es la resina para la columna vertebral de **baja viscosidad** y fácil uso. El proceso de preparación es sencillo y seguro, y no requiere el uso de un dispositivo de mezcla externo. Su fluidez óptima y su viscosidad permiten una fácil inyección durante un periodo de tiempo prolongado y la cantidad suficiente para aplicar tratamiento multinivel.

VENTAJAS:

- Sencillo y fácil de utilizar
- Sistema de mezcla incluido



ENVASE:

- 20 g de polvo
- 9,4 g de líquido
- 22,6 cc de volumen
- Recipiente de mezcla

FASES Y TIEMPOS DE FRAGUADO		
Mezclado (Fase Líquida)	1'00 a 1'30"	Tiempo de integración del polvo con el monómero.
Espera/ Reposo Llenado del dispositivo	0'00 a 1'00"	Fase de espera corta debido a su diseño para aplicaciones espinales.
Inyección (Fase de trabajo)	8'00 a 10'00"	Es la ventana crítica el cemento mantiene una viscosidad que permite el flujo a través de las cánulas.
Endurecimiento (Fase de fraguado)	3'00 a 5'00"	El cemento se empieza a polimerizar, la temperatura sube y el material se torna rígido.

Cra 67 # 43 - 17
Br. Salitre Greco

Tel : (+57) (1) 2214599
E-mail : info@promed.com.co

Distributed by:

