

# VORTEX

SISTEMA DE SHAVER



Distribuido por:

**PROMED**  
*Latam*

## Consola Shaver

- Pantalla LCD completamente táctil.
- Dos puertos para pieza de mano , cambia el modo de trabajo sin esfuerzo.
- Eficiencia de funcionamiento de las cuchillas :
  - FWD/REW 500-5000 rpm,
  - OSI 500-3000rpm
- Eficiencia de trabajo de las Fresas :  
6000-12000 rpm



## Condrotomo

- Velocidad máxima: 12000rpm
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga
- Esterilizable en autoclave



## Pedal

- Diseño impermeable



# VORTEX

## SISTEMA DE SHAVER

### ADVERTENCIA

- 1- Este dispositivo solo debe ser utilizado por profesionales con formación y conocimiento profundo de la cirugía ortopédica.
  - 2- La aplicación de presión/fuerza excesiva, como doblar o hacer palanca, puede hacer que las cuchillas o las fresas se doblen o rompan y pueden causar daños al paciente y/o al personal del quirófano. Si una cuchilla o fresa está doblada o dañada, reemplácela con una cuchilla o fresa nueva, según corresponda.
  - 3- Las cuchillas y las fresas son PARA UN SOLO USO. No intente esterilizar las cuchillas y las fresas para volver a utilizarlas.
  - 4- No permita que las cuchillas artroscópicas desechables o las fresas entren en contacto con objetos metálicos. Si ocurre contacto, puede causar que la cuchilla o fresa se rompan o se desprenda metal. Las piezas pequeñas de metal pueden ser difíciles de quitar del sitio quirúrgico.
  - 5- No haga funcionar las cuchillas a velocidades superiores a 5000 RPM, o se puede producir una generación excesiva de partículas. Las cuchillas SOLO se pueden usar en el modo Blade.
  - 6- No intente cambiar la cuchilla o la fresa mientras la pieza de mano esta funcionando.
- Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso (IFU).

PRODUCTO	REFERENCIA
CONSOLA SHAVER VORTEX	43-9916-710010
CONDROTOMO	43-9916-710014
PEDAL	43-9916-710321